

Пожалуйста, внимательно прочитайте информацию по использованию!

Капли глазные **Арифьюжн**

Инструкция по применению медицинского изделия

Предупреждение:

- Не прикасайтесь кончиком пипетки флакона к любым поверхностям, так как это может привести к загрязнению раствора.
- Не переливайте раствор в другие флаконы или контейнеры.
- Не используйте, если раствор изменил цвет или помутнел.
- Если вы чувствуете дискомфорт в глазах, слезотечение, изменение зрения, покраснение глаз, прекратите использование продукта и обратитесь за консультацией к своему врачу, поскольку данные проблемы могут привести к серьезным заболеваниям.
- При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.

Меры предосторожности:

- Всегда мойте и высушивайте руки перед использованием глазных капель.
- Закрывайте крышку флакона после использования.
- Держите флакон плотно закрытым, когда он не используется.
- Храните не выше 30°C.
- Использовать до истечения срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте более 60 суток после первого вскрытия флакона.
- Не используйте, если флакон был вскрыт или поврежден.
- Если используется более одного офтальмологического средства для местного применения, капли следует вводить с интервалом не менее пятнадцати (15) минут.

Форма выпуска:

Капли глазные. По 10 мл (ml) во флаконе полиэтиленовом (LDPE), со встроенным капельным устройством и навинчивающейся полиэтиленовой крышкой и с контролем первого вскрытия. По 1 флакону в пачке.

Состав:

Каждый мл содержит натрия гиалуроната 1 мг (mg).

Вспомогательные вещества: натрия карбоксиметилцеллюлозы, глицерин, борная кислота, натрия тетраборат, натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, магния хлорид, натрия перборат, хлористоводородная кислота или натрия гидроксид, вода для инъекций.

Свойства:

Глазные капли Арифьюжн имеют формулу, которая удачно сочетает действие трех компонентов: гиалуроната натрия, карбоксиметилцеллюлозы и глицерина для смазки, защиты и восстановления целостности глазной поверхности.

Арифьюжн обеспечивает длительную защиту глаз и комфорт благодаря новой технологии Bridget Matrix для синергического облегчения симптомов сухого глаза.

Гиалуронат натрия - это природный полимер с вязкоэластичным свойством, способствует заживлению и предотвращает обезвоживание поверхности глаз.

Карбоксиметилцеллюлоза - один из самых прочных мукоадгезивных полимеров, который сохраняет прямой контакт с эпителиальными клетками роговицы, что обеспечивает долговременные клинические преимущества. Глицерин в сочетании сначала оказывает смазывающий и увлажняющий эффекты на поверхности глаза, а затем работает под слезной пленкой обеспечивая защиту роговицы.

Перборат натрия, исчезающий консервант, сохраняет стерильность раствора во флаконе и исчезает при закапывании в глаза, так как распадается на кислород и воду, поэтому не остается в глазах.

Рекомендации по применению:

Глазные капли применяются для мгновенного облегчения симптомов при всех видах сухого глаза, и как защита от дальнейшего раздражения.

Глазные капли Арифьюжн совместимы со всеми видами контактных линз.

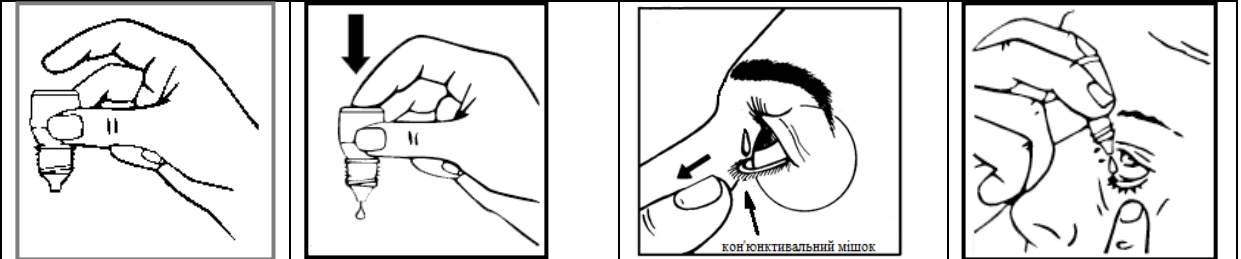
Перед применением необходимо посоветоваться с врачом.

Способ применения и дозы:

По 1-2 капли в каждый глаз 3 раза в сутки. После закапывания поморгайте несколько раз, чтобы раствор равномерно распределился по всей поверхности глаза. При моргании глазные капли Арифьюжн образуют защитную оболочку на поверхности глаза. При необходимости можно применять чаще.

Как использовать глазные капли Арифьюжн:

Снимите крышку с флакона. Держите флакон вверх дном в одной руке между большим и средним пальцами. Поднесите кончик флакона к глазу. Не позволяйте ему касаться глаз. Выпустите одну каплю в конъюнктивальный мешок, образованный между вашим глазом и веком, слегка постукивая или нажимая на основание флакона указательным пальцем (см. рисунок). Не сжимайте флакон.

**Побочные реакции:**

В целом глазные капли хорошо переносятся. Очень редко может возникнуть временное помутнение зрения, которое быстро проходит.

При возможном возникновении побочных реакций, связанных с гиперчувствительностью к любому из компонентов, обратитесь к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами:

Если капли вызвали нечеткость зрения, следует подождать, пока зрение прояснится.

Применение в период беременности и лактации:

Нет опыта по безопасности применения во время беременности и лактации.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к любому из компонентов.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 30°C и недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Использовать в течение 60 суток после первого открытия.

Упаковка:

Каждый флакон LDPE содержит 10 мл (ml) стерильных глазных капель.

Производитель:

АРИСТОФАРМА ЛТД.

7, Пурана Палтан Линия, Дакка-1000, Бангладеш.

Блок 1: Участок No 14-22, ул. № 11 и 12 Шампур-Кадамтали I/A, Дакка-1204.

Блок 2: Гачха, Газипур Садар, Газипур, Бангладеш.

Наименование и местонахождение уполномоченного представителя в Украине:

ООО "Аристовижн"

Киев-03022, Украина

переулок Коломыйский 17/31а

офис-1652

+38 044 257 32 57

aristovision.office@gmail.com

Дата последнего пересмотра инструкции по применению:

17.05.2023



UA.TR.121