
Инструкция по применению медицинского изделия

Предупреждение:

- Не прикасайтесь кончиком пипетки флакона к любым поверхностям, так как это может привести к загрязнению раствора.
- Не переливайте раствор в другие флаконы или контейнеры.
- Не используйте, если раствор изменил цвет.
- Если вы чувствуете дискомфорт в глазах, слезотечение, изменение зрения, покраснение глаз, прекратите использование продукта и обратитесь за консультацией к своему врачу, поскольку данные симптомы могут привести к серьезным заболеваниям.
- При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.

Меры предосторожности:

- Всегда мойте и высушивайте руки перед использованием глазных капель.
- Закрывайте крышку флакона после использования.
- Держите флакон плотно закрытым, когда он не используется.
- Храните не выше 30°C.
- Использовать до истечения срока годности, указанного на упаковке продукта.
- Не используйте более 60 суток после первого открытия флакона.
- Не используйте, если флакон был вскрыт или поврежден.
- Если используется более одного офтальмологического средства для местного применения, капли следует вводить с интервалом не менее пятнадцати (15) минут.

Форма выпуска:

Капли глазные, стерильные. По 10 мл (ml) во флаконе полиэтиленовом (LDPE), со встроенным капельным устройством и навинчивающейся полиэтиленовой крышкой с контролем первого открытия. По 1 флакону в пачке.

Состав:

Каждый мл раствора содержит полиэтилена гликоль 400 - 4 мг (mg) и пропилена гликоль - 3 мг (mg)

Вспомогательные вещества: гипромеллоза, натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид дигидрат, магния хлорид, цинка хлорид, борная кислота, натрия перборат, хлористоводородная кислота или натрия гидроксид, вода для инъекций.

Свойства:

Сочетание полиэтилена гликоль 400 и пропилена гликоль уменьшают выраженность симптомов "сухого глаза". Считается, что механизм действия обусловлен его уникальной системой гелеобразования и смазки, разработанной для приспособления к индивидуальному уровню pH слезной пленки каждого пациента. Когда компоненты капель сочетаются с естественными слезами, образуется поверхностно закрепленная система защиты на поверхности глаза. Это способствует здоровой среде на поверхности глаза, поэтому поврежденный эпителий глаза может быстрее восстанавливаться.

Гипромеллоза защищает эпителий роговицы, оказывает смазывающее и смягчающее действие, стабилизирует, воспроизводит оптические характеристики слезной пленки.

Перборат натрия, исчезающий консервант, сохраняет стерильность раствора во флаконе и исчезает при закапывании в глаза, так как распадается на кислород и воду, поэтому не остается в глазах.

Рекомендации по применению:

Для временного облегчения жжения и раздражения из-за возникновения сухости глаза. Это заменитель слезной жидкости для облегчения состояния сухого глаза, а также для стабилизации неустойчивой слезной пленки.

Перед применением необходимо посоветоваться с врачом.


Способ применения и дозы:

Хорошо встряхните флакон с каплями перед использованием.

Рекомендуется закапывать глазные капли по 1 капле 1-3 раза в день в конъюнктивный мешок пораженного глаза (глаз) по необходимости.

Как использовать глазные капли Аритеар:

Снимите крышку с флакона. Держите флакон вверх дном в одной руке между большим и средним пальцами. Поднесите кончик флакона к глазу. Не позволяйте ему касаться глаз. Выпустите одну каплю в конъюнктивальный мешок, образованный между вашим глазом и веком, слегка постукивая или нажимая на основание флакона указательным пальцем (см. рисунок). Не сжимайте флакон.

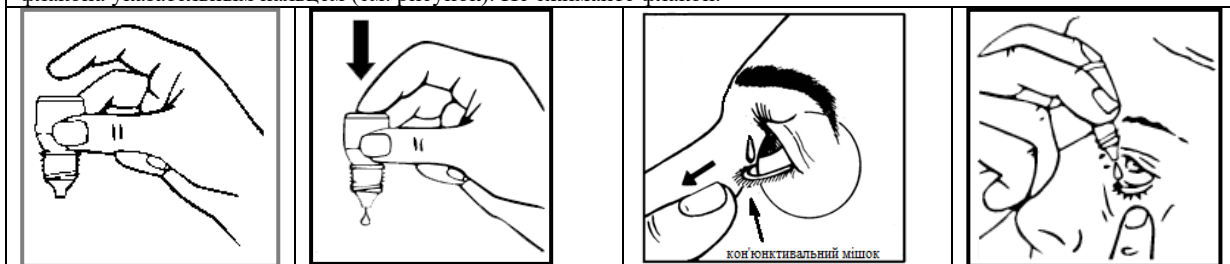

Побочные реакции:

В целом глазные капли хорошо переносятся. При возможном возникновении побочных реакций, связанных с гиперчувствительностью к любому из компонентов обратитесь к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами:

Если капли вызвали нечеткость зрения, следует подождать, пока зрение прояснится.

Применение в период беременности и лактации:

Нет опыта по безопасности применения во время беременности и лактации.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к одному из компонентов.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 30°C и недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Использовать в течение 60 суток после первого открытия.

Упаковка:

Каждый флакон LDPE содержит 10 мл (ml) стерильных глазных капель.

Производитель:

АРИСТОФАРМА ЛТД.

7, Пурана Палтан Линия, Дакка-1000, Бангладеш.

Блок 1: Участок No 14-22, ул. № 11 и 12 Шампур-Кадамтали I/A, Дакка-1204.

Блок 2: Гачха, Газипур Садар, Газипур, Бангладеш.

Наименование и местонахождение уполномоченного представителя в Украине:

ООО "Аристовижн"

Киев-03022, Украина

переулок Коломыйский 17/31а

офис-1652

+38 044 257 32 57

aristovision.office@gmail.com

Дата последнего пересмотра инструкции по применению:

17.05.2023



UA.TR.121