

Пожалуйста, внимательно прочитайте информацию по использованию!

Офтальмологический гель **Гипомер Гель**

Инструкция по применению медицинского изделия

Предупреждение:

- Не торкайтесь кончиком пипетки тубы до будь-яких поверхностей, так как это может привести до загрязнения розчину.
- Не используйте, если гель изменил цвет.
- Если вы чувствуете дискомфорт в глазах, слезотечение, зрительное помутнение, покраснение глаз, прекратите использование продукта и обратитесь за консультацией к своему врачу-офтальмологу, поскольку данные симптомы могут привести к серьезным заболеваниям.
- При контакте с глазами обратитесь за медицинской помощью.
- Не прикасайтесь кончиком пипетки тубы к любым поверхностям, так как это может привести к загрязнению раствора.
- Не используйте, если гель изменил цвет.
- Если вы чувствуете дискомфорт в глазах, слезотечение, изменение зрения, покраснение глаз, прекратите использование продукта и обратитесь за консультацией к своему врачу-офтальмологу, поскольку данные симптомы могут привести к серьезным заболеваниям.
- При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.

Меры предосторожности:

- Всегда мойте и высушите руки перед использованием офтальмологического геля.
- Закрывайте крышку тубы после использования.
- Тримайте тубу плотно закрытой, когда она не используется.
- Храните не выше 30°C.
- Используйте до истечения срока годности, указанного на упаковке продукта.
- Не используйте более 60 дней после первого открытия тубы.
- Если используется более одного офтальмологического средства для местного применения, каплевидный гель следует вводить с интервалом не менее пятнадцати (15) минут.
- Всегда мойте и высушивайте руки перед использованием офтальмологического геля.
- Закрывайте крышку тубы после использования.
- Держите тубу плотно закрытой, когда она не используется.
- Храните не выше 30°C.
- Использовать до истечения срока годности, указанного на упаковке продукта.
- Не используйте более 60 суток после первого открытия тубы.
- Если используется более одного офтальмологического средства для местного применения, каплевидный гель следует вводить с интервалом не менее пятнадцати (15) минут.

Форма выпуска:

Офтальмологический гель. По 10 г (g) в тубе с навинчивающейся крышкой. По 1 тубе в упаковке.

Состав:

Каждый грамм содержит 3 мг (mg) гипромеллозы (обогащенной Карбомером 980).

Вспомогательные вещества: карбомер 980, раствор сорбита, динатрия эдетат, натрия перборат, хлористоводородная кислота или натрия гидроксид, вода для инъекций.

Свойства:

Гипомер Гель - прозрачный бесцветный каплевидный гель. Особенность продукта заключается в его тиксотропных свойствах, благодаря которым обеспечивается равномерное распределение по поверхности глаза. Гипомер Гель сочетает в себе выгодные свойства капель-геля долго оставаться на поверхности глаза. Такая комбинация обеспечивает длительное действие для пользователей с глазным дискомфортом. Легкая гипотоничность геля быстро "нейтрализуется" слегка гипертонической слезной жидкостью, вызванной сухостью глаз.

Гипромеллоза защищает эпителий роговицы, оказывает смазывающее и смягчающее действие, стабилизирует, воспроизводит оптические характеристики слезной пленки. Способствует эпителизации, уменьшает гиперемию и размеры очагов поражения (эффект проявляется через 3–5 дней).

Перборат натрия, исчезающий консервант, сохраняет стерильность раствора во флаконе и исчезает при закапывании в глаза, так как распадается на кислород и воду, поэтому не остается в глазах.

Рекомендации по применению:

Для длительного облегчения симптомов сухости глаза - раздражения, жжения, слезотечения. Обеспечивает равномерное покрытие и длительный эффект.

Перед применением необходимо посоветоваться с врачом.

Способ применения и дозы:

Закапывать по 1 капле в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (глаз)

1-2 раза в сутки. При необходимости можно применять чаще.

Возможно временное помутнение зрения после применения, которое быстро проходит при моргании.

Как использовать офтальмологический гель Гипомер Гель:

Снимите крышку с тубы. Поднесите кончик тубы к глазу. Не позволяйте ему касаться глаза. Выпустите одну каплю в конъюнктивальный мешок, образованный между вашим глазом и веком. Сделайте несколько морганий для равномерного распределения капель по поверхности глаза.



Побочные реакции:

В целом глазной гель хорошо переносится.

Не часто сообщалось о жжении, аллергических реакциях или покраснении.

При тяжелой форме сухости может возникать жжение, которое быстро проходит.

При возможном возникновении побочных реакций, связанных с гиперчувствительностью к любому из компонентов, обратитесь к врачу.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к любому из компонентов этого продукта.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами:

Если продукт вызвал нечеткость зрения, следует подождать, пока зрение прояснится.

Применение в период беременности и лактации:

Нет опыта по безопасности применения геля во время беременности и лактации.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 30°C и недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года. Использовать в течение 60 суток после первого вскрытия.

Упаковка:

По 10 г (g) в тубе стерильного офтальмологического геля.

Производитель:

АРИСТОФАРМА ЛТД.

7, Пурана Палтан Линия, Дакка-1000, Бангладеш.

Блок 1: Участок No 14-22, ул. № 11 и 12 Шампур-Кадамтали I/A, Дакка-1204.

Блок 2: Гачха, Газипур Садар, Газипур, Бангладеш.

Наименование и местонахождение уполномоченного представителя в Украине:

ООО "Аристовижн"
Киев-03022, Украина
переулок Коломыйский 17/31а
офис-1652+38 044 257 32 57
aristovision.office@gmail.com

Дата последнего пересмотра инструкции по применению:

17.05.2023



UA.TR.121