

## Капли глазные **Гиалурон**

### Инструкция по применению медицинского изделия

---

#### **Предупреждение:**

- Не прикасайтесь кончиком пипетки флакона к любым поверхностям, так как это может привести к загрязнению раствора.
- Не переливайте раствор в другие флаконы или контейнеры.
- Не используйте, если раствор изменил цвет.
- Если вы чувствуете дискомфорт в глазах, слезотечение, изменение зрения, покраснение глаз, прекратите использование продукта и обратитесь за консультацией к своему врачу, поскольку данные проблемы могут привести к серьезным заболеваниям.
- При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.
- Если используется более одного офтальмологического средства для местного применения, капли следует вводить с интервалом не менее пятнадцати (15) минут.

#### **Меры предосторожности:**

- Всегда мойте и высушивайте руки перед использованием глазных капель.
- Закрывайте крышку флакона после использования.
- Держите флакон плотно закрытым, когда он не используется.
- Храните не выше 30°C.
- Использовать до истечения срока годности, указанного на упаковке продукта.
- Не используйте более 60 суток после первого открытия флакона.
- Не используйте, если флакон был вскрыт или поврежден.

---

#### **Форма выпуска:**

Капли глазные капли. По 10 мл (ml) во флаконе полиэтиленовом(LDPE), со встроенным капельным устройством и навинчивающейся полиэтиленовой крышкой и с контролем первого открытия. По 1 флакону в пачке.

#### **Состав:**

каждый мл содержит натрия гиалуроната 2 мг (mg).

**Вспомогательные вещества:** натрия хлорид, динатрия эдетат, натрия дигидрофосфат дигидрат, динатрия гидрогенфосфат дигидрат, натрия перборат, хлористоводородная кислота или натрия гидроксид, вода для инъекций.

#### **Свойства:**

Глазные капли Гиалурон (гиалуронат натрия)- это природный полимер с вязкоэластичным свойством, который смазывает и увлажняет поверхность глаза. Увлажняющие и защитные свойства гиалуроната способствуют устранению раздражения, ощущения сухости, жжения и постороннего предмета в глазах из-за воздействия окружающей среды, а именно ветра, солнца, сухого воздуха, соленой воды, дыма, слишком яркого света, кондиционированного воздуха, отопления, длительной работы за компьютером или в случае хирургической операции на глазах, конъюнктиве или частого и длительного пользования контактными линзами. Перборат натрия, исчезающий консервант, сохраняет стерильность раствора во флаконе и исчезает при закапывании в глаза, так как распадается на кислород и воду, поэтому не остается в глазах.

#### **Рекомендации по применению:**

Симптоматическое применение при сухости роговицы и конъюнктивы (синдром "сухих глаз"), возможно применение в послеоперационный период, а также рекомендован пользователям всех видов контактных линз. Перед применением необходимо посоветоваться с врачом.


#### **Способ применения и дозы:**

Рекомендуется закапывать по 1 капле 3 раза в день в нижний конъюнктивальный мешок. При необходимости можно применять чаще.

После закапывания поморгайте несколько раз, чтобы раствор равномерно распределился по всей поверхности глаза. При моргании гиалуронат натрия образует защитную оболочку на поверхности глаза.

## Как использовать глазные капли Гиалурон:

Снимите крышку с флакона. Держите флакон вверх дном в одной руке между большим и средним пальцами. Поднесите кончик флакона к глазу. Не позволяйте ему касаться глаз. Выпустите одну каплю в конъюнктивальный мешок, образованный между вашим глазом и веком, слегка постукивая или нажимая на основание флакона указательным пальцем (см. рисунок). Не сжимайте флакон.

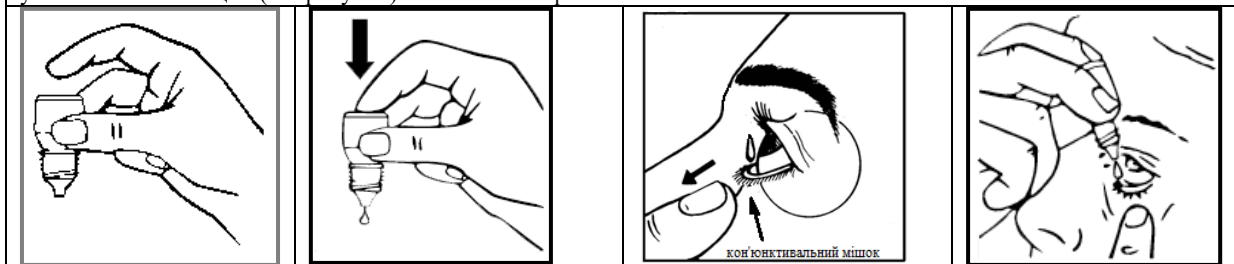

### Побочные реакции:

Обычно капли хорошо переносятся. В очень редких случаях сообщалось о развитии реакций гиперчувствительности, которые исчезали сразу после прекращения применения препарата. Обратитесь к врачу, если раздражение, боль в глазах, изменения зрения ухудшаются или сохраняются в течение 72 часов.

### Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами:

Если капли вызвали нечеткость зрения, следует подождать, пока зрение прояснится.

### Применение в период беременности и лактации:

Нет опыта по безопасности применения во время беременности и лактации.

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к любому из компонентов.

### Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 30°C и недоступном для детей месте.

### Срок годности:

2 года. Использовать в течение 60 суток после первого открытия.

### Упаковка:

Каждый флакон LDPE содержит 10 мл (ml) стерильных глазных капель.

### Производитель:

**АРИСТОФАРМА ЛТД.**

7, Пурана Палтан Линия, Дакка-1000, Бангладеш.

Блок 1: Участок № 14-22, вул. № 11 і 12 Шампур-Кадамтали I/A , Дакка-1204.

Блок 2: Гачха, Газипур Садар, Газипур, Бангладеш.

### Наименование и местонахождение уполномоченного представителя в Украине:

ТОВ «Аристовижн»

Киев-03022, Украина

пров. Коломыйский 17/31а

офис-1652

+38 044 257 32 57

aristovision.office@gmail.com

### Дата последнего пересмотра инструкции по применению:

17.05.2023



UA.TR.121