

Пожалуйста, внимательно прочитайте информацию по использованию!

Капли глазные **Протеар**

Инструкция по применению медицинского изделия

Предупреждение:

- Не прикасайтесь кончиком пипетки флакона к любым поверхностям, так как это может привести к загрязнению раствора.
- Не переливайте раствор в другие флаконы или контейнеры.
- Не используйте, если раствор изменил цвет.
- Если вы чувствуете дискомфорт в глазах, слезотечение, изменение зрения, покраснение глаз, прекратите использование продукта и обратитесь за консультацией к врачу, поскольку данные проблемы могут привести к серьезным заболеваниям.
- При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.

Меры предосторожности:

- Всегда мойте и высушивайте руки перед использованием глазных капель.
 - Закрывайте крышку флакона после использования.
 - Держите флакон плотно закрытым, когда он не используется.
 - Храните не выше 30°C.
 - Использовать до истечения срока годности, указанного на упаковке продукта.
 - Не используйте более 60 суток после первого открытия флакона.
 - Не используйте, если флакон был вскрыт или поврежден.
 - Если используется более одного офтальмологического средства для местного применения, капли следует вводить с интервалом не менее тридцати (30) минут.
-

Форма выпуска:

Капли глазные. По 10 мл (ml) во флаконе полиэтиленовом (LDPE), со встроенным капельным устройством и навинчивающейся полиэтиленовой крышкой и с контролем первого открытия. По 1 флакону в пачке.

Состав:

Каждый мл содержит повидона (колидон 17 PF) 50 мг (mg).

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид дигидрат, магния хлорид, борная кислота, раствор натрия лактат, натрия перборат, натрия гидроксид или хлористоводородная кислота, вода для инъекций.

Свойства:

Сухость глаз может возникать когда нарушается муциновый слой слезной пленки. Недостаток муцина может привести к разрушению защитной слезной пленки, и как следствие к образованию так называемых сухих пятен на роговице глаза, что может вызвать в дальнейшем поверхностный точечный кератит. Синдром "сухих глаз" может проявляться как жжение, зуд, светобоязнь и ощущение раздражения ("песка") в глазах.

Глазные капли "Протеар" содержат низкомолекулярный апирогенный повидон с молекулярной массой 7000-11000. Низкомолекулярный повидон (Протеар глазные капли) имеет дезинтоксикационные свойства, что может уменьшать влияние токсинов на поверхность глаза. Полезен также в тяжелых случаях глазной аллергической реакции, так как образует защитный слой на поверхности глаза.

После местного применения глазные капли Протеар быстро распространяются по конъюнктиве и роговице, выполняя роль заместителя муцина предотвращают развитие раздражения глаз и, как следствие, дегидратации эпителия глаза.

При этом образует увлажняющий и защитный слой, что обусловлено его лубрикующими свойствами, способностью абсорбироваться на поверхности глаза, уменьшать поверхностное натяжение и повышать вязкость водных растворов. Это дает возможность использовать его при синдроме "сухих глаз".

Перборат натрия, исчезающий консервант, сохраняет стерильность раствора во флаконе и исчезает при закапывании в глаза, так как распадается на кислород и воду, поэтому не остается в глазах.

Рекомендации по применению:

- При ощущении жжения, зуда, светобоязни, раздражении, сухости и усталости глаз, вызванные уменьшением выработки или отсутствием секрета слезных желез.
- У пациентов с глазной аллергией Протеар особенно полезен, так как образует защитный слой, который блокирует аллергены - пыльцу и пылевые клещи.
- Может использоваться как дезинтоксикант.

- Его также иногда используют при язвах роговицы поскольку он покрывает роговицу защитным слоем, поэтому помогает в процессе заживления.
- Может помочь пользователям контактных линз, которые жалуются на сухость глаз.
- Могут быть предложены после хирургических и лазерных вмешательств для компенсации дефицита водно-муцинового слоя слезной пленки.

Перед применением необходимо посоветоваться с врачом.

Способ применения и дозы:

Хорошо встряхните флакон с каплями перед использованием. Назначают взрослым по 1-2 капли в один глаз 3-4 раза в сутки. При необходимости можно применять чаще.

Перед применением капель следует снять контактные линзы и установить не ранее, чем через 30 минут после закапывания.

При использовании дополнительно других капель, должен быть интервал между закапыванием не менее 30 минут. "Протеар" всегда должен быть последним.

Як використовувати очні краплі Протеар:



Побочные реакции:

В целом глазные капли хорошо переносятся.

Редко сообщалось о легком временном жжении.

При возможном возникновении побочных реакций, связанных с гиперчувствительностью к любому из компонентов обратитесь к врачу.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к любому из компонентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами:

Если капли вызвали нечеткость зрения, следует подождать, пока зрение прояснится.

Применение в период беременности и лактации:

Нет опыта по безопасности применения во время беременности и лактации.

Срок годности:

Хранить при температуре не выше 30°C и недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Использовать в течение 60 суток после первого вскрытия флакона.

Упаковка:

Каждый флакон LDPE содержит 10 мл (ml) стерильных глазных капель.

Производитель:

АРИСТОФАРМА ЛТД.

7, Пурана Палтан Линия, Дакка-1000, Бангладеш.

Блок 1: Участок № 14-22, ул. № 11 и 12 Шампур-Кадамтали I/A, Дакка-1204.

Блок 2: Гачха, Газипур Садар, Газипур, Бангладеш.

Наименование и местонахождение уполномоченного представителя в Украине:

ООО "Аристовижн"
Киев-03022, Украина
переулок Коломыйский 17/31а
офис-1652
+38 044 257 32 57
aristovision.office@gmail.com

Дата последнего пересмотра инструкции по применению:
17.05.2023



UA.TR.121