

Пожалуйста, внимательно прочитайте информацию по использованию!

Глазные капли **Энсиэл**

Инструкция по применению медицинского изделия

Предупреждение:

- Не прикасайтесь кончиком пипетки флакона к любым поверхностям, так как это может привести к загрязнению раствора.
- Не переливайте раствор в другие флаконы или контейнеры.
- Не используйте, если раствор изменил цвет.
- Если вы чувствуете дискомфорт в глазах, слезотечение, изменение зрения, покраснение глаз, прекратите использование продукта и обратитесь за консультацией к своему врачу, поскольку данные симптомы могут привести к серьезным заболеваниям.
- При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.

Меры предосторожности:

- Всегда мойте и высушивайте руки перед использованием глазных капель.
- Закрывайте крышку флакона после использования.
- Держите флакон плотно закрытым, когда он не используется.
- Храните при температуре не выше 30°C.
- Используйте до истечения срока годности, указанного на упаковке продукта.
- Не используйте более 60 суток после первого вскрытия флакона.
- Не используйте, если флакон был вскрыт или поврежден.
- Если используется более одного офтальмологического средства для местного применения, капли следует вводить с интервалом не менее пятнадцати (15) минут.

Форма выпуска:

Капли глазные капли. По 10 мл (ml) во флаконе полиэтиленовом (LDPE), со встроенным капельным устройством и навинчивающейся полиэтиленовой крышкой и с контролем первого открытия. По 1 флакону в пачке.

Состав:

Каждый мл раствора содержит натрия хлорида 50 мг (mg).

Вспомогательные вещества: маннитол, борная кислота, натрия тетраборат, натрия перборат, натрия гидроксид, хлористоводородная кислота или натрия гидроксид, вода для инъекций.

Свойства:

Энсиэл является гипертоническим офтальмологическим раствором, который за счет осмотического эффекта выводит лишнюю жидкость из роговицы. Это уменьшает отек роговицы и связанные с ним симптомы.

Перборат натрия, исчезающий консервант, сохраняет стерильность раствора во флаконе и исчезает при закапывании в глаза, так как распадается на кислород и воду, поэтому не остается в глазах.

Рекомендации по применению:

Для временного облегчения в случае отека роговицы после операции на глазу, после травмы, для снятия отека, который возник при воспалении и инфекции, или является вторичным следствием различных глазных заболеваний. Орошения при оказании первой помощи при удалении инородных частиц из глаза.


Перед применением необходимо посоветоваться с врачом.

Способ применения и дозы:

Закапывать по 1 капле в поврежденный глаз каждые 3-4 часа или по назначению врача.

Как использовать глазные капли Энцил:

Снимите крышку с флакона. Держите флакон вверх дном в одной руке между большим и средним пальцами. Поднесите кончик флакона к глазу. Не позволяйте ему касаться глаз. Выпустите одну каплю в конъюнктивальный мешок, образованный между вашим глазом и веком, слегка постукивая или нажимая на основание флакона указательным пальцем (см. рисунок). Не сжимайте флакон.

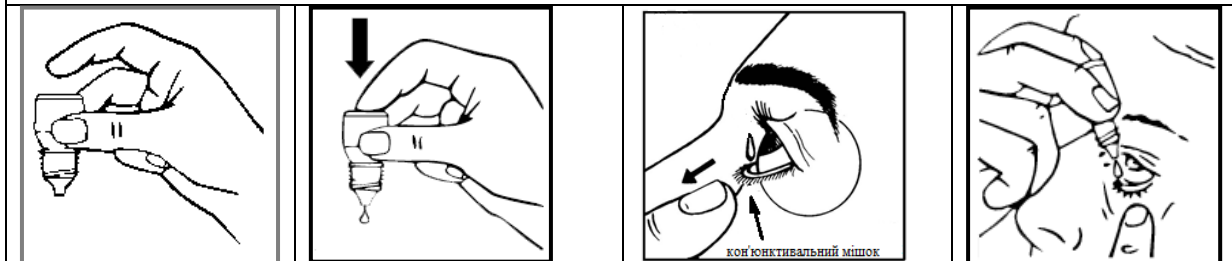

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к любому из компонентов.

Побочные реакции:

Некоторое время после применения капель зрение может быть временно нечетким.

Редко может возникать покраснение, жжение, боль, отек в глазах или вокруг глаз, которое быстро проходит.

При возможном возникновении побочных реакций, связанных с гиперчувствительностью к любому из компонентов, обратитесь к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами:

Если капли вызвали нечеткость зрения, следует подождать, пока зрение прояснится.

Применение в период беременности и лактации:

Нет опыта по безопасности применения во время беременности и лактации.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 30°C и недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Использовать в течение 60 суток после первого вскрытия флакона.

Упаковка:

Каждый флакон LDPE содержит 10 мл (ml) стерильных глазных капель.

Производитель:

АРИСТОФАРМА ЛТД.

7, Пурана Палтан Линия, Дакка-1000, Бангладеш.

Блок 1: Участок No 14-22, ул. № 11 и 12 Шампур-Кадамтали I/A, Дакка-1204.

Блок 2: Гачха, Газипур Садар, Газипур, Бангладеш.

Наименование и местонахождение уполномоченного представителя в Украине:

ООО "Аристовижн"

Киев-03022, Украина

переулок Коломыйский 17/31а

офис-1652

+38 044 257 32 57

aristovision.office@gmail.com

Дата последнего пересмотра инструкции по применению:

17.05.2023



UA.TR.121