

Будь ласка, уважно прочитайте інформацію з використання!

Краплі очні **Аріфьюжн**
(Arifusion eye drops)

Інструкція із застосування медичного виробу

Попередження:

- Не торкайтеся кінчиком піпетки флакона до будь-яких поверхонь, так як це може призвести до забруднення розчину.
- Не переливайте розчин в інші флакони або контейнери.
- Не використовуйте, якщо розчин змінив колір або помутнів.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт в очах, слезотечу, зміну зору, почервоніння очей, припиніть використання продукту і зверніться за консультацією до свого лікаря, оскільки дані проблеми можуть призвести до серйозних захворювань.
- При ковтанні зверніться за медичною допомогою.

Запобіжні заходи:

- Завжди мийте і висушуйте руки перед використанням очних крапель.
- Закривайте кришку флакона після використання.
- Тримайте флакон щільно закритим, коли він не використовується.
- Зберігайте не вище 30°C.
- Використовувати до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
- Не використовуйте більше 60 днів після першого відкриття флакона.
- Не використовуйте, якщо флакон був розкритий або пошкоджений.
- Якщо використовується більше одного офтальмологічного засобу для місцевого застосування, краплі слід вводити з інтервалом не менше п'ятнадцяти (15) хвилин.

Форма випуску:

Краплі очні. По 10 мл (ml) у флаконі поліетиленовому (LDPE), із вбудованим крапельним пристроєм і кришкою поліетиленовою, що нагвинчується та з контролем першого відкриття. По 1 флакону у пачці.

Склад:

Кожен мл містить натрію гіалуронату 1 мг (mg).

Допоміжні речовини: натрію карбоксиметилцелюлози, гліцерин, борна кислота, натрію тетраборат, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид, магнію хлорид, натрію перборат, хлористоводнева кислота або натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

Властивості:

Очні краплі Аріфьюжн мають формулу, яка вдало поєднує дію трьох компонентів: гіалуронату натрію, карбоксиметилцелюлози та гліцерину для змачення, захисту та відновлення цілісності очної поверхні. Аріфьюжн забезпечує тривалий захист очей та комфорт завдяки новій технології Bridget Matrix для синергічного полегшення симптомів сухого ока.

Гіалуронат натрію - це природний полімер з в'язкоеластичною властивістю, що сприяє загоєнню та запобігає зневодненню поверхні очей.

Карбоксиметилцелюлоза - один з найміцніших мукоадгезивних полімерів, який зберігає прямий контакт з епітеліальними клітинами рогівки, що забезпечує довготривалі клінічні переваги.

Гліцерин в поєднанні спочатку надає змашуючий і зволожуючий ефекти на поверхні ока, а потім працює під слізною плівкою забезпечуючи захист рогівки.

Перборат натрію, зникаючий консервант, зберігає стерильність розчину у флаконі та зникає при закапуванні в очі, так як розпадається на кисень і воду, тому не залишається в очах.

Рекомендації щодо застосування:

Очні краплі застосовуються для миттєвого полегшення симптомів при всіх видах сухого ока, та як захист від подальшого подразнення.

Очні краплі Аріфьюжн сумісні з всіма видами контактних лінз.


Перед застосуванням необхідно порадитися з лікарем.

Спосіб застосування та дози:

По 1-2 краплі в кожне око 3 рази на добу. Після закапування поморгайте кілька разів, щоб розчин рівномірно розподілився по всій поверхні ока. При морганні очні краплі Аріфьюжн утворюють захисну оболонку на поверхні ока. При необхідності можна застосовувати частіше.

Як використовувати очні краплі Аріфьюжн:

Зніміть кришку з флакона. Тримайте флакон догори дном в одній руці між великим і середнім пальцями. Піднесіть кінчик флакону до ока. Не дозволяйте йому торкатися очей. Випустіть одну краплю в кон'юнктивальний мішок, утворений між вашим оком і повікою, злегка постукуючи або натискаючи на основу флакона вказівним пальцем (див. малюнок). Не стискайте флакон.

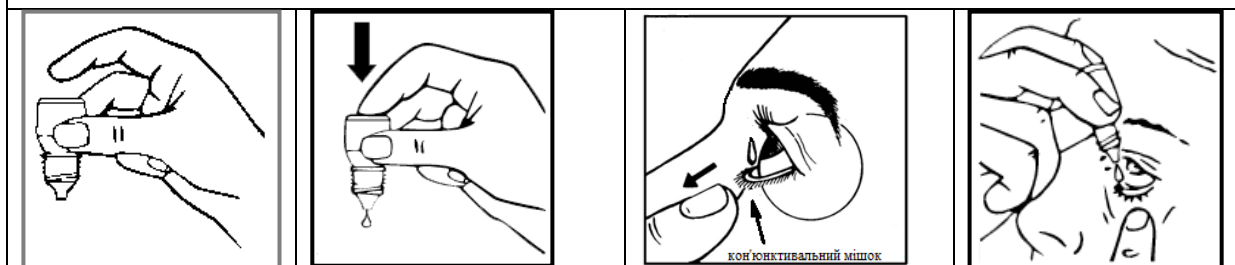

Побічні реакції:

В цілому очні краплі добре переносяться. Дуже рідко може виникнути тимчасове помутніння зору, яке швидко минає.

При можливому виникненні побічних реакцій, пов'язаних з гіперчутливістю до будь-якого з компонентів, зверніться до лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами:

Якщо краплі викликали нечіткість зору, слід зачекати, поки зір проясниться.

Застосування у період вагітності та лактації:

Немає досвіду щодо безпеки застосування під час вагітності та лактації.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 30°C та недоступному для дітей місці.

Термін придатності:

2 роки. Використовувати протягом 60 діб після першого відкриття.

Упаковка:

Кожен флакон LDPE містить 10 мл (ml) стерильних очних крапель.

Виробник:

АРІСТОФАРМА ЛТД.

7, Пурана Палтан Лінія, Дакка-1000, Бангладеш.

Блок 1: Ділянка No 14-22, вул. № 11 і 12 Шампур-Кадамталі I/A, Дакка-1204, Бангладеш.

Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника в Україні:

ТОВ «Арістовіжн»

Київ-03022, Україна

пров. Коломийський 17/31а

офіс-1652

+38 044 257 32 57

aristovision.office@gmail.com

Дата останнього перегляду інструкції із застосування:

25.03.2024



UA.TR.121

Позначення нанесені на пакуванні:	
	Стерильно. Стерилізовано, використовуючі асептичні методи оброблення
	Ознайомлення з інструкціями для застосування
	Код партії (партія)
	Дата виготовлення (вироблено)
	Зберігати при температурі не вище 30°C
	Дата використання (придатний до, місяць та останні цифри року)
	Виробник
	Знак відповідності технічним регламентам
	Номер за каталогом
UA.TR.121	Ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності