

Краплі очні **Арітеар**
(Aritear eye drops)

Інструкція із застосування медичного виробу

Попередження:

- Не торкайтеся кінчиком піпетки флакона до будь-яких поверхонь, так як це може призвести до забруднення розчину.
- Не переливайте розчин в інші флакони або контейнери.
- Не використовуйте, якщо розчин змінив колір.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт в очах, слезотечу, зміну зору, почервоніння очей, припиніть використання продукту і зверніться за консультацією до свого лікаря, оскільки дані симптоми можуть призвести до серйозних захворювань.
- При кожному зверненні за медичною допомогою.

Запобіжні заходи:

- Завжди мийте і висушуйте руки перед використанням очних крапель.
- Закривайте кришку флакона після використання.
- Тримайте флакон щільно закритим, коли він не використовується.
- Зберігайте не вище 30°C.
- Використовувати до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці продукту.
- Не використовуйте більше 60 днів після першого відкриття флакона.
- Не використовуйте, якщо флакон був розкритий або пошкоджений.
- Якщо використовується більше одного офтальмологічного засобу для місцевого застосування, краплі слід вводити з інтервалом не менше п'ятнадцяти (15) хвилин.

Форма випуску:

Краплі очні. По 10 мл (ml) у флаконі поліетиленовому (LDPE), із вбудованим крапельним пристроєм і кришкою поліетиленовою, що нагвинчується та з контролем першого відкриття. По 1 флакону у пачці.

Склад:

Кожен мл розчину містить поліетилену гліколь 400 - 4 мг (mg) та пропілену гліколь - 3 мг (mg)

Допоміжні речовини: гіпромелоза, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид дигідрат, магнію хлорид, цинку хлорид, борна кислота, натрію перборат, хлористоводнева кислота або натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

Властивості:

Поєднання поліетилену гліколь 400 та пропілену гліколь зменшують вираженість симптомів «сухого ока». Вважається, що механізм дії обумовлений його унікальною системою гелеутворення та змащення, розробленою для пристосування до індивідуального рівня pH слізної плівки кожного пацієнта. Коли компоненти крапель поєднуються з природними слезами, утворюється поверхнево закріплена система захисту на поверхні ока. Це сприяє здоровому середовищу на поверхні ока, тому пошкоджений епітелій ока може швидше відновлюватися.

Гіпромелоза захищає епітелій рогівки, чинить змашувальну та пом'якшувальну дію, стабілізує, відтворює оптичні характеристики слізної плівки.

Перборат натрію, зникаючий консервант, зберігає стерильність розчину у флаконі та зникає при закапуванні в очі, так як розпадається на кисень і воду, тому не залишається в очах.

Рекомендації щодо застосування:

Для тимчасового полегшення печіння та подразнення через виникнення сухості ока. Це замінник слізної рідини для полегшення стану сухого ока, а також для стабілізації нестійкої слізної плівки.

Перед застосуванням необхідно порадитися з лікарем.

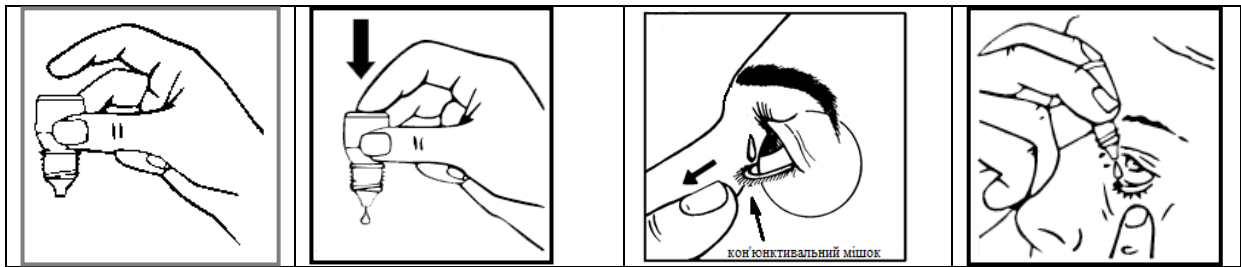
Спосіб застосування та дози:

Добре струсіть флакон з краплями перед використанням.

Рекомендується закапувати очні краплі по 1 краплі 1-3 рази на день в кон'юнктивальний мішок ураженого ока (очей) за потребою.

Як використовувати очні краплі Арітеар:

Зніміть кришку з флакона. Тримайте флакон догори дном в одній руці між великим і середнім пальцями. Піднесіть кінчик флакону до ока. Не дозволяйте йому торкатися очей. Випустіть одну краплю в кон'юнктивальний мішок, утворений між вашим оком і повікою, злегка постукуючи або натискаючи на основу флакона вказівним пальцем (див. малюнок). Не стискайте флакон.

**Побічні реакції:**

В цілому очні краплі добре переносяться. При можливому виникненні побічних реакцій, пов'язаних з гіперчутливістю до будь-якого з компонентів зверніться до лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами:
Якщо краплі викликали нечіткість зору, слід зачекати, поки зір проясниться.

Застосування у період вагітності та лактації:

Немає досвіду щодо безпеки застосування під час вагітності та лактації.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 30°C та недоступному для дітей місці.

Термін придатності:

2 роки. Використовувати протягом 60 днів після першого відкриття.

Упаковка:

Кожен флакон LDPE містить 10 мл (ml) стерильних очних крапель.

Виробник:

АРІСТОФАРМА ЛТД.

7, Пурана Палтан Лінія, Дакка-1000, Бангладеш.

Блок 2: Гачха, Газіпур Садар, Газіпур, Бангладеш.

Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника в Україні:

ТОВ «Арістовіжн»

Київ-03022, Україна

пров. Колосівський 17/31а

офіс-1652

+38 044 257 32 57

aristovision.office@gmail.com

Дата останнього перегляду інструкції із застосування:

25.03.2024



UA.TR.121

Позначення нанесені на пакуванні:	
	Стерильно. Стерилізовано, використовуючі асептичні методи оброблення
	Ознайомлення з інструкціями для застосування
	Код партії (партія)
	Дата виготовлення (вироблено)
	Зберігати при температурі не вище 30°C
	Дата використання (придатний до, місяць та останні цифри року)
	Виробник
	Знак відповідності технічним регламентам
	Номер за каталогом
UA.TR.121	Ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності