

Будь ласка, уважно прочитайте інформацію з використання!

Краплі очні **Енсіел**
(NCL eye drops)

Інструкція із застосування медичного виробу

Попередження:

- Не торкайтеся кінчиком піпетки флакона до будь-яких поверхонь, так як це може призвести до забруднення розчину.
- Не переливайте розчин в інші флакони або контейнери.
- Не використовуйте, якщо розчин змінив колір.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт в очах, слъзотечу, зміну зору, почервоніння очей, припиніть використання продукту і зверніться за консультацією до свого лікаря, оскільки дані симптоми можуть призвести до серйозних захворювань.
- При ковтанні зверніться за медичною допомогою.

Запобіжні заходи:

- Завжди мийте і висушуйте руки перед використанням очних крапель.
- Закривайте кришку флакона після використання.
- Тримайте флакон щільно закритим, коли він не використовується.
- Зберігайте при температурі не вище 30°C.
- Використовувати до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці продукту.
- Не використовуйте більше 60 днів після першого відкриття флакона.
- Не використовуйте, якщо флакон був розкритий або пошкоджений.
- Якщо використовується більше одного офтальмологічного засобу для місцевого застосування, краплі слід вводити з інтервалом не менше п'ятнадцяти (15) хвилин.

Форма випуску:

Краплі очні. По 10 мл (ml) у флаконі поліетиленовому (LDPE), із вбудованим крапельним пристроєм і кришкою поліетиленовою, що нагвинчується та з контролем першого відкриття. По 1 флакону у пачці.

Склад:

Кожен мл розчину містить натрію хлориду 50 мг (mg).

Допоміжні речовини: маннітол, борна кислота, натрію тетраборат, натрію перборат, натрію гідроксид, хлористоводнева кислота або натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

Властивості:

Енсіел є гіпертонічним офтальмологічним розчином, який за рахунок осмотичного ефекту виводить зайву рідину з рогівки. Це зменшує набряк рогівки та пов'язані з ним симптоми.

Перборат натрію, зникаючий консервант, зберігає стерильність розчину у флаконі та зникає при закапуванні в очі, так як розпадається на кисень і воду, тому не залишається в очах.

Рекомендації щодо застосування:

Для тимчасового полегшення у разі набряку рогівки після операції на оці, після травми, для зняття набряку, який виник при запаленні та інфекції, або є вторинним наслідком різних очних захворювань. Зрошення при наданні першої допомоги при видаленні сторонніх часток з ока.

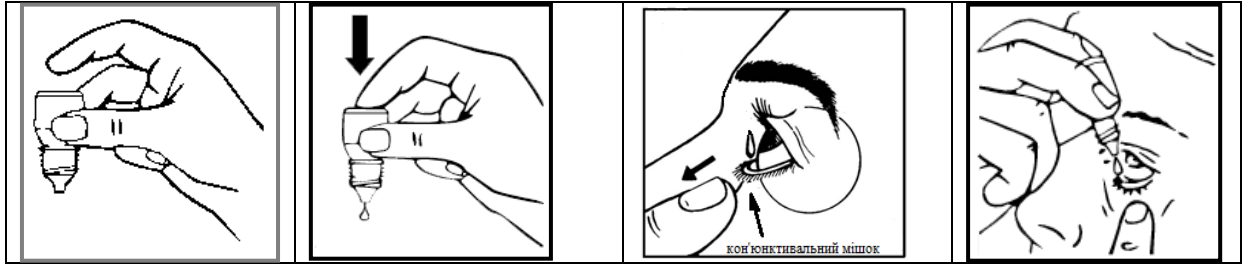
Перед застосуванням необхідно порадитися з лікарем.

Спосіб застосування та дози:

Закапувати по 1 краплі в ушкоджене око кожні 3-4 години або за призначенням лікаря.

Як використовувати очні краплі Енсіел:

Зніміть кришку з флакона. Тримайте флакон догори дном в одній руці між великим і середнім пальцями. Піднесіть кінчик флакону до ока. Не дозволяйте йому торкатися очей. Випустіть одну краплю в кон'юнктивальний мішок, утворений між вашим оком і повікою, злегка постукуючи або натискаючи на основу флакона вказівним пальцем (див. малюнок). Не стискайте флакон.

**Протипоказання:**

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.

Побічні реакції:

Деякий час після застосування крапель зір може бути тимчасово нечітким.

Рідко може виникати почервоніння, печіння, біль, набряк в очах або навколо очей, яке швидко минає.

При можливому виникненні побічних реакцій, пов'язаних з гіперчутливістю до будь-якого з компонентів, зверніться до лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами:

Якщо краплі викликали нечіткість зору, слід зачекати, поки зір проясниться.

Застосування у період вагітності та лактації:

Немає досвіду щодо безпеки застосування під час вагітності та лактації.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 30°C та недоступному для дітей місці.

Термін придатності:

2 роки. Використовувати протягом 60 діб після першого відкриття флакону.

Упаковка:

Кожен флакон LDPE містить 10 мл (ml) стерильних очних крапель.

Виробник:

АРІСТОФАРМА ЛТД.

7, Пурана Палтан Лінія, Дакка-1000, Бангладеш.

Блок 2: Гачха, Газіпур Садар, Газіпур, Бангладеш.

Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника в Україні:

ТОВ «Арістовіжн»

Київ-03022, Україна

пров. Коломийський 17/31а

офіс-1652

+38 044 257 32 57

aristovision.office@gmail.com

Дата останнього перегляду інструкції із застосування:

25.03.2024



UA.TR.121

Позначення нанесені на пакуванні:	
	Стерильно. Стерилізовано, використовуючі асептичні методи оброблення
	Ознайомлення з інструкціями для застосування
	Код партії (партія)
	Дата виготовлення (вироблено)
	Зберігати при температурі не вище 30°C
	Дата використання (придатний до, місяць та останні цифри року)
	Виробник
	Знак відповідності технічним регламентам
	Номер за каталогом
UA.TR.121	Ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності