

Краплі очні **Гіалурон**
(Hyloron eye drops)

Інструкція із застосування медичного виробу

Попередження:

- Не торкайтеся кінчиком піпетки флакона до будь-яких поверхонь, так як це може призвести до забруднення розчину.
- Не переливайте розчин в інші флакони або контейнери.
- Не використовуйте, якщо розчин змінив колір.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт в очах, сльозотечу, зміну зору, почервоніння очей, припиніть використання продукту і зверніться за консультацією до свого лікаря, оскільки дані проблеми можуть призвести до серйозних захворювань.
- При ковтанні зверніться за медичною допомогою.
- Якщо використовується більше одного офтальмологічного засобу для місцевого застосування, краплі слід вводити з інтервалом не менше п'ятнадцяти (15) хвилин.

Запобіжні заходи:

- Завжди мийте і висушуйте руки перед використанням очних крапель.
- Закривайте кришку флакона після використання.
- Тримайте флакон щільно закритим, коли він не використовується.
- Зберігайте не вище 30°C.
- Використовувати до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці продукту.
- Не використовуйте більше 60 днів після першого відкриття флакона.
- Не використовуйте, якщо флакон був розкритий або пошкоджений.

Форма випуску:

Краплі очні. По 10 мл (ml) у флаконі поліетиленовому (LDPE), із вбудованим крапельним пристроєм і кришкою поліетиленою, що нагвинчується та з контролем першого відкриття. По 1 флакону у паці.

Склад:

кожен мл містить натрію гіалуронату 2 мг (mg).

Допоміжні речовини: натрію хлорид, динатрію едетат, натрію дигідрофосфат дигідрат, динатрію гідрофосфат дигідрат, натрію перборат, хлористоводнева кислота або натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

Властивості:

Очні краплі Гіалурон (гіалуронат натрію)- це природний полімер з в'язкоеластичною властивістю, який змачує та зволожує поверхню ока. Зволожуючі і захисні властивості гіалуронату сприяють усуненню подразнення, відчуття сухості, печіння і стороннього предмета в очах через вплив навколишнього середовища, а саме вітру, сонця, сухого повітря, солоної води, диму, занадто яскравого світла, кондиціонованого повітря, опалення, тривалої роботи за комп'ютером або в разі хірургічної операції на очах, кон'юнктиві або частого і тривалого користування контактними лінзами.

Перборат натрію, зникаючий консервант, зберігає стерильність розчину у флаконі та зникає при закапуванні в очі, так як розпадається на кисень і воду, тому не залишається в очах.

Рекомендації щодо застосування:

Симптоматичне застосування при сухості рогівки та кон'юнктиви (синдром "сухих очей"), можливе застосування в післяопераційний період, а також рекомендований користувачам всіх видів контактних лінз. Перед застосуванням необхідно порадитися з лікарем.

Спосіб застосування та дози:

Рекомендується закапувати по 1 краплі 3 рази на день в нижній кон'юнктивальний мішок. При необхідності можна застосовувати частіше.

Після закапування поморгайте кілька разів, щоб розчин рівномірно розподілився по всій поверхні ока. При морганні гіалуронат натрію утворює захисну оболонку на поверхні ока.

Як використовувати очні краплі Гіалурон:

Зніміть кришку з флакона. Тримайте флакон догори дном в одній руці між великим і середнім пальцями. Піднісіть кінчик флакону до ока. Не дозволяйте йому торкатися очей. Випустіть одну краплю в кон'юнктивальний мішок, утворений між вашим оком і повікою, злегка постукуючи або натискаючи на основу флакона вказівним пальцем (див. малюнок). Не стискайте флакон.

**Побічні реакції:**

Зазвичай краплі добре переносяться. У дуже рідких випадках повідомлялося про розвиток реакцій гіперчутливості, які зникали одразу після припинення застосування препарату. Зверніться до лікаря, якщо подразнення, біль в очах, зміни зору погіршуються або зберігаються протягом 72 годин.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами:

Якщо краплі викликали нечіткість зору, слід зачекати, поки зір проясниться.

Застосування у період вагітності та лактації:

Немає досвіду щодо безпеки застосування під час вагітності та лактації.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 30°C та недоступному для дітей місці.

Термін придатності:

2 роки. Використовувати протягом 60 діб після першого відкриття.

Упаковка:

Кожен флакон LDPE містить 10 мл(ml) стерильних очних крапель.

Виробник:

АРІСТОФАРМА ЛТД.

7, Пурана Палтан Лінія, Дакка-1000, Бангладеш.

Блок 1: Ділянка No 14-22, вул. № 11 і 12 Шампур-Кадамталі I/A, Дакка-1204, Бангладеш.

Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника в Україні:

ТОВ «Арістовіжн»

Київ-03022, Україна

пров. Коломийський 17/31а

офіс-1652

+38 044 257 32 57

aristovision.office@gmail.com

Дата останнього перегляду інструкції із застосування:

25.03.2024

Позначення нанесені на пакуванні:	
	Стерильно. Стерилізовано, використовуючі асептичні методи оброблення
	Ознайомлення з інструкціями для застосування
	Код партії (партія)
	Дата виготовлення (вироблено)
	Зберігати при температурі не вище 30°C
	Дата використання (придатний до, місяць та останні цифри року)
	Виробник
	Знак відповідності технічним регламентам
	Номер за каталогом
UA.TR.121	Ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності