

Будь ласка, уважно прочитайте інформацію з використання!

Офтальмологічний гель **Гіпомер Гель** (Hypomer Gel)

Інструкція із застосування медичного виробу

Попередження:

- Не торкайтеся кінчиком піпетки туби до будь-яких поверхонь, так як це може призвести до забруднення розчину.
- Не використовуйте, якщо гель змінив колір.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт в очах, слъзотечу, зміну зору, почервоніння очей, припиніть використання продукту і зверніться за консультацією до свого лікаря, оскільки дані симптоми можуть призвести до серйозних захворювань.
- При ковтанні зверніться за медичною допомогою.

Запобіжні заходи:

- Завжди мийте і висушуйте руки перед використанням офтальмологічного гелю.
- Закривайте кришку туби після використання.
- Тримайте тубу щільно закриту, коли вона не використовується.
- Зберігайте не вище 30°C.
- Використовувати до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці продукту.
- Не використовуйте більше 60 діб після першого відкриття туби.
- Якщо використовується більше одного офтальмологічного засобу для місцевого застосування, краплевидний гель слід вводити з інтервалом не менше п'ятнадцяти (15) хвилин.

Форма випуску:

Офтальмологічний гель. По 10 г (g) в тубі з кришкою що нагвинчується. По 1 тубі у пачці.

Склад:

Кожен грам містить 3 мг (mg) гіпромелози (збагаченої Карбомером 980).

Допоміжні речовини: карбомер 980, розчин сорбіту, динатрію едетат, натрію перборат, хлористоводнева кислота або натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

Властивості:

Гіпомер Гель - прозорий безбарвний краплевидний гель. Особливість продукту полягає в його тиксотропних властивостях, завдяки яким забезпечується рівномірне розподілення по поверхні ока. Гіпомер Гель поєднує в собі вигідні властивості крапель-гелю довго залишатись на поверхні ока. Така комбінація забезпечує тривалу дію для користувачів з очним дискомфортом.

Легка гіпотонічність гелю швидко "нейтралізується" злегка гіпертонічною слізною рідиною, викликаного сухістю очей.

Гіпромелоза захищає епітелій рогівки, чинить змашувальну та пом'якшувальну дію, стабілізує, відтворює оптичні характеристики слізної плівки. Сприяє епітелізації, зменшує гіперемію та розміри вогнищ ураження (ефект проявляється через 3–5 днів).

Перборат натрію, зникаючий консервант, зберігає стерильність розчину у флаконі та зникає при закапуванні в очі, так як розпадається на кисень і воду, тому не залишається в очах.

Рекомендації щодо застосування:

Для тривалого полегшення симптомів сухості ока- подразнення, печіння, слъзотечі. Забезпечує рівномірне покриття та тривалий ефект.

Перед застосуванням необхідно порадитися з лікарем.

Спосіб застосування і дози:

Закапувати по 1 краплі в кон'юнктивальний мішок ураженого ока (очей)

1-2 рази на добу. При необхідності можна застосовувати частіше.

Можливе тимчасове помутніння зору після застосування, яке швидко минає при морганні.

Як використовувати офтальмологічний гель Гіпомер Гель:

Зніміть кришку з туби. Піднесіть кінчик туби до ока. Не дозволяйте йому торкатися ока. Випустіть одну краплю в кон'юнктивальний мішок, утворений між вашим оком і повікою. Зробіть декілька моргань для рівномірного розподілення крапель по поверхні ока.



Побічні реакції:

В цілому очний гель добре переноситься.

Не часто повідомлялося про печіння, алергічні реакції або почервоніння.

При тяжкій формі сухості може виникати печіння, яке швидко минає.

При можливому виникненні побічних реакцій, пов'язаних з гіперчутливістю до будь-якого з компонентів, зверніться до лікаря.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів цього продукту.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами:

Якщо продукт викликав нечіткість зору, слід зачекати, поки зір проясниться.

Застосування у період вагітності та лактації:

Немає досвіду щодо безпеки застосування гелю під час вагітності та лактації.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 30°C та недоступному для дітей місці.

Термін придатності:

3 роки. Використовувати протягом 60 діб після першого відкриття.

Упаковка:

По 10 г (g) у тубі стерильного офтальмологічного гелю.

Виробник:

ARISTOPHARMA LTD.

7, Пурана Палтан Лінія, Дакка-1000, Бангладеш.

Блок 1: Ділянка No 14-22, вул. № 11 і 12 Шампур-Кадамталі I/A, Дакка-1204, Бангладеш.

Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника в Україні:

ТОВ «Арістовіжн»

Київ-03022, Україна

пров. Коломийський 17/31а

офіс-1652

+38 044 257 32 57

aristovision.office@gmail.com

Дата останнього перегляду інструкції із застосування:

25.03.2024



UA.TR.121

Позначення нанесені на пакуванні:	
	Стерильно. Стерилізовано, використовуючі асептичні методи оброблення
	Ознайомлення з інструкціями для застосування
	Код партії (партія)
	Дата виготовлення (вироблено)
	Зберігати при температурі не вище 30°C
	Дата використання (придатний до, місяць та останні цифри року)
	Виробник
	Знак відповідності технічним регламентам
	Номер за каталогом
UA.TR.121	Ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності