

Будь ласка, уважно прочитайте інформацію з використання!

Краплі очні **Протеар**
(Protear eye drops)

Інструкція із застосування медичного виробу

Попередження:

- Не торкайтеся кінчиком піпетки флакона до будь-яких поверхонь, так як це може призвести до забруднення розчину.
- Не переливайте розчин в інші флакони або контейнери.
- Не використовуйте, якщо розчин змінив колір.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт в очах, сльозотечу, зміну зору, почервоніння очей, припиніть використання продукту і зверніться за консультацією до лікаря, оскільки дані проблеми можуть призвести до серйозних захворювань.
- При ковтанні зверніться за медичною допомогою

Запобіжні заходи:

- Завжди мийте і висушуйте руки перед використанням очних крапель.
- Закривайте кришку флакона після використання.
- Тримайте флакон щільно закритим, коли він не використовується.
- Зберігайте не вище 30°C.
- Використовувати до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці продукту.
- Не використовуйте більше 60 діб після першого відкриття флакона.
- Не використовуйте, якщо флакон був розкритий або пошкоджений.
- Якщо використовується більше одного офтальмологічного засобу для місцевого застосування, краплі слід вводити з інтервалом не менше тридцяти (30) хвилин.

Форма випуску:

Краплі очні. По 10 мл (ml) у флаконі поліетиленовому (LDPE), із вбудованим крапельним пристроєм і кришкою поліетиленовою, що нагвинчується та з контролем першого відкриття. По 1 флакону у пацці.

Склад:

Кожен мл містить повідону (колідон 17 PF) 50 мг (mg).

Допоміжні речовини: натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид дигідрат, магнію хлорид, борна кислота, розчин натрію лактат, натрію перборат, натрію гідроксид або хлористоводнева кислота, вода для ін'єкцій.

Властивості:

Сухість очей може виникати коли порушується муциновий шар слізної плівки. Нестача муцину може призвести до руйнування захисної слізної плівки, і як наслідок до утворення так званих сухих плям на рогівці ока що може спричинити в подальшому поверхневий точковий кератит. Синдром "сухих очей" може проявлятися як печіння, свербіж, світлобоязнь та відчуття подразнення ("піску") в очах.

Очні краплі «Протеар» містять низькомолекулярний апірогенний повідон з молекулярною масою 7000-11000.

Низькомолекулярний повідон (Протеар очні краплі) має дезінтоксикаційні властивості, що може зменшувати вплив токсинів на поверхню ока. Корисний також у тяжких випадках очної алергічної реакції, так як утворює захисний шар на поверхні ока.

Після місцевого застосування очні краплі Протеар швидко поширюються по кон'юнктиві та рогівкою, виконуючи роль заступника муцину запобігають розвитку подразнення очей і, як наслідок, дегідратації епітелію ока.

При цьому утворює зволожувальний та захисний шар що зумовлено його лубрикуючими властивостями, здатністю абсорбуватись на поверхні ока, зменшувати поверхневий натяг і підвищувати в'язкість водних розчинів. Це надає можливість використовувати його при синдромі "сухих очей".

Перборат натрію, зникаючий консервант, зберігає стерильність розчину у флаконі та зникає при закапуванні в очі, так як розпадається на кисень і воду, тому не залишається в очах.

Рекомендації щодо застосування:

- При відчутті печіння, свербіжу, світлобоязні, подразненні, сухості та втомі очей, спричинені зменшенням продукування або відсутністю секрету слізних залоз.
- У пацієнтів з очною алергією Протеар можуть бути корисний, так як утворює захисний шар, який блокує алергени - пилок і пилові кліщі.
- Може використовуватись як дезінтоксикант.
- Його також іноді використовують при виразках рогівки оскільки він покриває рогівку захисним шаром, тому допомагає в процесі загоєння.
- Може допомогти користувачам контактних лінз, які скаржаться на сухість очей.

- Можуть бути запропоновані після хірургічних і лазерних втручань для компенсації дефіциту водно-муцинового шару слізної плівки.

Перед застосуванням необхідно порадитися з лікарем.

Спосіб застосування та дози:


Добре струсіть флакон з краплями перед використанням. Призначають дорослим по 1-2 краплі в одне око 3-4 рази на добу. При необхідності можна застосовувати частіше.

Перед застосуванням крапель слід зняти контактні лінзи і встановити не раніше, чим через 30 хвилин після закапування.

При використанні додатково інших крапель, повинен бути інтервал між закапуванням не менше 30 хвилин. «Протеар» завжди повинен бути останнім.

Як використовувати очні краплі Протеар:

Зніміть кришку з флакона. Тримайте флакон догори дном в одній руці між великим і середнім пальцями. Піднесіть кінчик флакону до ока. Не дозволяйте йому торкатися очей. Випустіть одну краплю в кон'юнктивальний мішок, утворений між вашим оком і повікою, злегка постукуючи або натискаючи на основу флакона вказівним пальцем (див. малюнок). Не стискайте флакон.

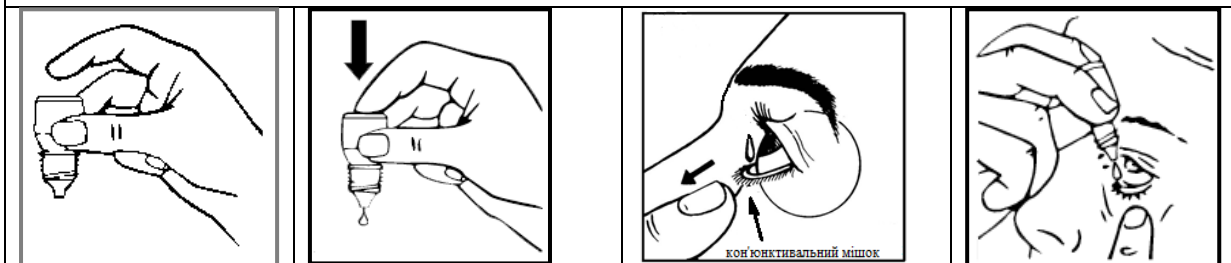

Побічні реакції:

В цілому очні краплі добре переносяться.

Рідко повідомлялося про легке тимчасове печіння.

При можливому виникненні побічних реакцій, пов'язаних з гіперчутливістю до будь-якого з компонентів зверніться до лікаря.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами:

Якщо краплі викликали нечіткість зору, слід зачекати, поки зір проясниться.

Застосування у період вагітності та лактації:

Немає досвіду щодо безпеки застосування під час вагітності та лактації.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 30°C та недоступному для дітей місці.

Термін придатності:

2 роки. Використовувати протягом 60 діб після першого відкриття флакону.

Упаковка:

Кожен флакон LDPE містить 10 мл (ml) стерильних очних крапель.

Виробник:

АРІСТОФАРМА ЛТД.

7, Пурана Палтан Лінія, Дакка-1000, Бангладеш.

Блок 2: Гачха, Газіпур Садар, Газіпур, Бангладеш.

Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника в Україні:

ТОВ «Арістовіжн»

Київ-03022, Україна

пров. Коломийський 17/31а

офіс-1652

+38 044 257 32 57

aristovision.office@gmail.com

Дата останнього перегляду інструкції із застосування:

25.03.2024



UA.TR.121

Позначення нанесені на пакуванні:	
	Стерильно. Стерилізовано, використовуючі асептичні методи оброблення
	Ознайомлення з інструкціями для застосування
	Код партії (партія)
	Дата виготовлення (вироблено)
	Зберігати при температурі не вище 30°C
	Дата використання (придатний до, місяць та останні цифри року)
	Виробник
	Знак відповідності технічним регламентам
	Номер за каталогом
UA.TR.121	Ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності