

Будь ласка, уважно прочитайте інформацію з використання!

Краплі очні **Гіалурон** (монодоза без консервантів)

Інструкція із застосування медичного виробу

Попередження:

- Не торкайтеся кінчиком піпетки монодоза до будь-яких поверхонь, так як це може призвести до забруднення розчину.
- Не переливайте розчин в інші флакони або контейнери.
- Не використовуйте, якщо розчин змінив колір.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт в очах, слезотечу, зміну зору, почервоніння очей, припиніть використання продукту і зверніться за консультацією до свого лікаря, оскільки дані симптоми можуть призвести до серйозних захворювань.
- При ковтанні зверніться за медичною допомогою.

Запобіжні заходи:

- Завжди мийте і висушуйте руки перед використанням очних крапель.
- Зберігайте при температурі не вище 30°C.
- Використовувати до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці продукту.
- Не використовуйте більше 12 годин після відкриття монодоза.
- Не використовуйте, якщо монодоза була розкрита або пошкоджена.
- Якщо використовується більше одного офтальмологічного засобу для місцевого застосування, краплі слід вводити з інтервалом не менше п'яти (5) хвилин.

Форма випуску:

Краплі очні. Кожний саше містить 5 монодоз у флаконах. Кожна монодоза у флаконі по 0,4 мл(ml).

Склад:

Кожен мл розчину містить натрію гіалуронату 2 мг (mg).

Допоміжні речовини: натрію хлорид, натрію дигідроген, фосфату дигідрат, натрію гідроген, фосфату дигідрат, натрію гідроксид або хлористоводнева кислота, вода для ін'єкцій.

Властивості:

Очні краплі Гіалурон монодоза (гіалуронат натрію)- це природний полімер з в'язкоеластичною властивістю, який зм'якшує та зволожує поверхню ока. Зволожуючі і захисні властивості гіалуронату сприяють усуненню подразнення, відчуття сухості, печіння і стороннього предмета в очах через вплив навколишнього середовища, а саме вітру, сонця, сухого повітря, солоної води, диму, занадто яскравого світла, кондиціонованого повітря, опалення, тривалої роботи за комп'ютером або в разі хірургічної операції на очах, кон'юнктиві або частого і тривалого користування контактними лінзами.

Рекомендації щодо застосування:

Симптоматичне застосування при сухості рогівки та кон'юнктиви (синдром "сухих очей"), можливе застосування в післяопераційний період, а також рекомендований користувачам всіх видів контактних лінз. Перед застосуванням необхідно порадитися з лікарем.

Спосіб застосування та дози:

За необхідності закапайте одну або дві краплі в уражене око(очі).

Як використовувати очні краплі Гіалурон монодоза:

Завжди використовуйте очні краплі Гіалурон монодоза, як описано в цій інструкції або за вказівкою лікаря. Перед використанням переконайтеся, що монодоза не пошкоджена. Розчин рекомендовано використати одразу після відкриття. Вмісту одного флакона з разовою дозою достатньо для обох очей. Нанесіть очні краплі Гіалурон монодоза, що не містять консервантів, у такий спосіб (кроки з 1 по 8, малюнки нижче).

Крок 1: Дістаньте захисний пакет з упаковки Гіалурон монодоза. Відкрийте захисний пакет і витягніть смужку з монодозами.

Крок 2: Зніміть зі смужки одну монодозу. Помістіть смужку з монодозами, що залишилися, назад у захисний пакет.

Крок 3. Тримайте монодозу Гіалурон вертикально.


Крок 4: Постукайте по верхній частині монодози, поки весь розчин не опиниться в нижній частині монодози.

Крок 5: Відкрийте монодозу Гіалурон, відкрутивши кришку. Щоб уникнути забруднення переконайтеся, що кінчик монодози ні до чого не торкається.

Крок 6: Нахиліть голову назад. Якщо ви не можете нахилити голову, ляжте. Акуратно відтягніть нижню повіку вниз і подивіться вгору.

Крок 7: Піднесіть кінчик монодози Гіалурон близько до ока, але будьте обережні, не торкайтеся ним ока. Акуратно стисніть монодозу і випустіть краплю. Очні краплі Гіалурон монодоза, що не містять консервантів, закапуються всередину нижньої повіки.

Крок 8: Закрийте на мить очі. Натисніть на внутрішній куточок ока вказівним пальцем приблизно на одну хвилину.

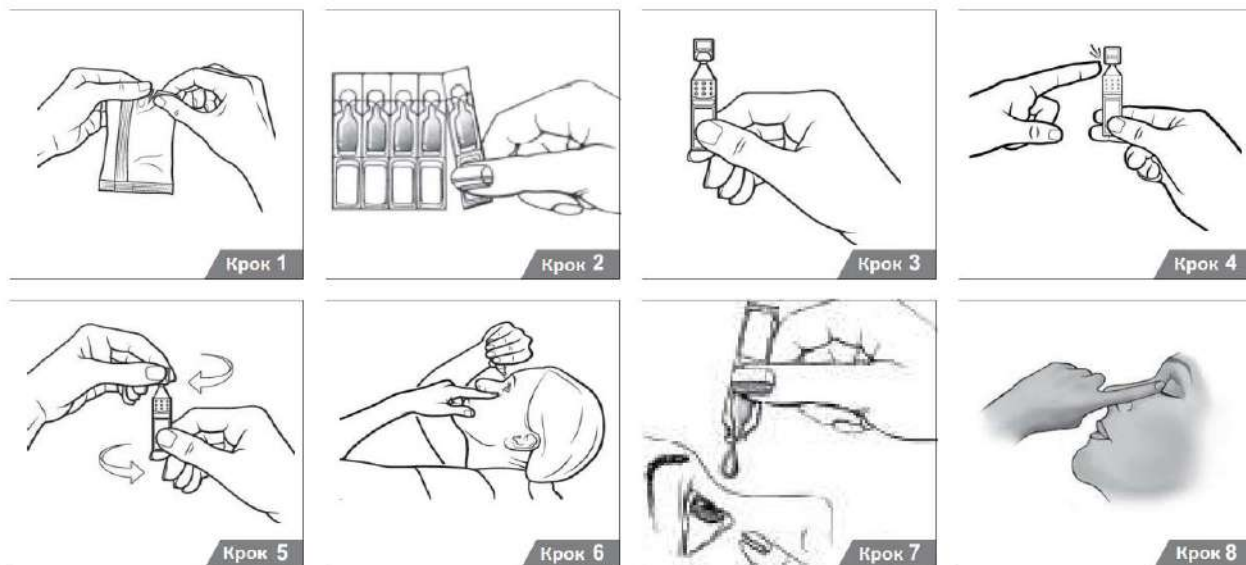

Протипоказання:

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.

Побічні реакції:

Оскільки натрію гіалуронат 0.2% не містить консервантів, це дає змогу уникнути потенційних ризиків, спричинених консервантами.

При можливому виникненні побічних реакцій, пов'язаних з гіперчутливістю до будь-якого з компонентів, зверніться до лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами:

Якщо краплі викликали нечіткість зору, слід зачекати, поки зір проясниться.

Застосування у період вагітності та лактації:

Немає досвіду щодо безпеки застосування під час вагітності та лактації.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 30°C та недоступному для дітей місці.

Термін придатності:

2 роки. Викинути через 12 годин після відкриття.

Упаковка:

Очні краплі Гіалурон монодоза без консервантів: кожний саше містить 5 монодоз у флаконах. Кожна монодоза у флаконі містить 0,4 мл(ml) стерильних очних крапель.

Виробник:

ARISTOPHARMA LTD.

7, Пурана Палтан Лінія, Дакка-1000, Бангладеш.

Блок 2: Гачха, Газіпур Садар, Газіпур, Бангладеш.

Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника в Україні:

ТОВ «Арістовіжн»
Київ-03022, Україна
пров. Коломийський 17/31а

Позначення нанесені на пакуванні:	
	Стерильно. Стерилізовано, використовуючі асептичні методи оброблення
	Ознайомлення з інструкціями для застосування
	Код партії (партія)
	Дата виготовлення (вироблено)
	Зберігати при температурі не вище 30°C
	Дата використання (придатний до, місяць та останні цифри року)
	Виробник
	Знак відповідності технічним регламентам
	Номер за каталогом
UA.TR.121	Ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності

офіс-1652
+38 044 257 32 57
aristovision.office@g
mail.com

Дата останнього
перегляду
інструкції із
застосування:
22.02.2024



UA.TR.121